





CPR station 사용자 가이드

☰ Version APR 2025

다른 제품에 대한 설명서:  [제품 가이드](#)

▼ Language (언어)

KO 한국어  [CPR station 사용자 가이드](#)

EN English  [CPR station User Guide \(English ver.\)](#)

자주 묻는 질문 ?

▼ Q. 연습 모드, 랭킹 모드 버튼을 선택할 수 없어요

Q1. '마네킹이 연결되었는지 확인해주세요.'라고 나타나고, 연습 모드와 랭킹 모드 버튼이 활성화되지 않습니다. 어떻게 해야 할까요?

A1. 마네킹 전원 케이블이 정확히 장착되어 있는지 확인해주세요.
(
사용 준비하기 페이지를 참조해주세요.)

▼ Q. 기기의 사용 언어를 어떻게 바꾸나요?

Q2. 기기의 사용 언어를 바꾸고 싶은데, 어떻게 해야 할까요?

A2. '메인화면' 왼쪽 상단 'Language' 버튼을 눌러 언어를 변경할 수 있습니다.

▼ Q. 제품이 고장난 경우 어떻게 AS 받을 수 있나요?

Q3. 제품이 고장난 경우 어떻게 AS 받을 수 있나요?

A3. contact@imlabworld.com 으로 문의주시고, 담당자와 상담을 통해 진행됩니다.



구입 정보, 수량에 따라 배송 일정 및 금액, 배송 방법이 달라질 수 있습니다.

▼ Q. CPR station의 볼륨을 조절하려면, 어떻게 해야 하나요?

Q4. CPR station의 볼륨을 조절하려면, 어떻게 해야 하나요?

A4. 다음 절차를 따라서 음량을 조절해주세요.

CPR station 의 설정 볼륨을 조절하는방법

1. '메인화면' 우측 상단  버튼을 눌러 관리자 모드에 진입 합니다.
2. 하단 메뉴 중 스피커  버튼을 눌러주세요.
3. 하단의 음량조절 슬라이더를 조절하여 적절한 음량을 설정합니다.



전화로 바로 문의하기

070-5056-3900 월~금 10:00-17:00 토/일/공휴일 휴무

CPR Staition 소개 및 구성

- [CPR station 소개 및 구성](#)
- [CPR station 사용 준비하기](#)
- [CPR station 초기설정 안내](#)

CPR Staition 주요 기능 안내

- [CPR station 주요 기능](#)

CPR Staition 설정

- [관리자 모드 \(키오스크 설정\).](#)

CPR Station 원격 관리용 웹 안내

- [원격 관리용 웹 안내](#)



CPR station 소개 및 구성

1.1. CPR station 소개


CPR station은 사용자가 쉽게 심폐소생술을 스스로 학습할 수 있도록 도와주는 키오스크입니다.

CPR station에서 다음 기능을 활용하여 학습을 진행할 수 있습니다.



영상 콘텐츠

3분 내외의 영상 클립으로 심폐소생술의 개념과 순서, 수행 방법에 대해 배울 수 있습니다. 주요 내용에 대한 북마크가 있어 필요한 내용으로 빠르게 이동할 수 있습니다.

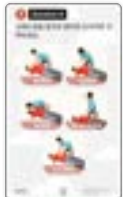

CPR 퀴즈

간단한 퀴즈를 풀며 심폐소생술에 대한 개념을 올바르게 숙지했는지 점검해 볼 수 있습니다. 퀴즈를 풀면 곧바로 해설이 표시되어 학습내용을 즉시 복습하고 개념을 바로잡을 수 있습니다.



연습 모드

Station 에 함께 장비된 마네킹 또는 cprCUBE로 직접 심폐소생술을 실습해봅니다. 실시간으로 사용자의 심폐소생술이 적절했는지 피드백을 표시합니다. 실습이 끝나면 결과를 보고 저장할 수 있습니다.



랭킹 모드

정해진 기준(시간/횟수)의 심폐소생술을 수행하여 누가 더 잘 수행했는지 겨뤄보는 모드입니다. 실습이 끝나면 사용자의 누적 순위를 보여줍니다. CPR station pro 모델의 경우 여러명이서 레이싱에 참여하거나, 여러대의 키오스크 사이의 통합 순위를 확인할 수 있습니다.



키오스크 설정

초기 설정 및 관리자 모드 페이지를 통해 키오스크 설정, 마네킹 연결 관리, 등록된 결과 보기, 앱 정보에 관련된 내용을 확인 및 설정이 가능합니다.

1.2. CPR station 구성



CPR station는 스탠드 및 디스플레이부, 마네킹 실습부로 구성됩니다. 각 부는 키오스크의 스펙에 따라 변경될 수 있습니다.

스탠드 및 디스플레이부

화면을 표시하는 터치 디스플레이와 프로그램을 실행하는 본체, 그리고 화면을 적절한 위치에 고정시켜주는 스탠드가 포함됩니다.

마네킹 실습부

센서가 장착된 심폐소생술 연습용 마네킹 또는 cprCUBE Pro 장치 그리고 선택적으로 받침대가 포함됩니다.



CPR station 사용 준비하기

2.1. CPR station 초기 구성 및 설치



이미 초기 세팅이 완료된 채로 납품받으신 일반사용자의 경우, 이 항목을 생략하고 2.2. 항목으로 이동하셔도 됩니다.

2.1.1. 초기 마네킹 셋업


- ① 마네킹 또는 cprCUBE Pro의 전원을 켜십시오. 모델에 따라 전원을 연결 하거나 배터리를 공급하세요.
- ② CPRplus 앱을 앱스토어 또는 구글스토어에서 다운로드 받습니다.

▼ 다운로드 받기

Appstore

CPRplus- cprCUBE Training App

Discover innovative CPR training with CPRplus! Choose your mode freely according to your educational needs and dive deep into the intricacies of CPR. « Scenario

 <https://apps.apple.com/us/app/cprplus-cprcube-training-app/id6480102785>



Google Store

CPRplus- cprCUBE Training App - Apps on Google Play

Struggling with CPR? Try CPRplus, a fun, effective app for mastering CPR easily!


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imlabworld.cpr_plus&pli=1



③ 앱을 실행하여 '키트 연결'을 눌러 마네킹을 연결하세요. 연결시 팝업되는 초기 설정 가이드를 따르세요.

④ 컬러아이디를 마네킹에 할당하세요. 컬러아이디는 마네킹을 구분하는 색상+숫자 조합으로, 마네킹 검색시 표시됩니다. 할당된 컬러아이디에 해당하는 스티커를 마네킹의 잘 보이는 곳에 부착해주세요.

▼ 컬러아이디 할당 과정

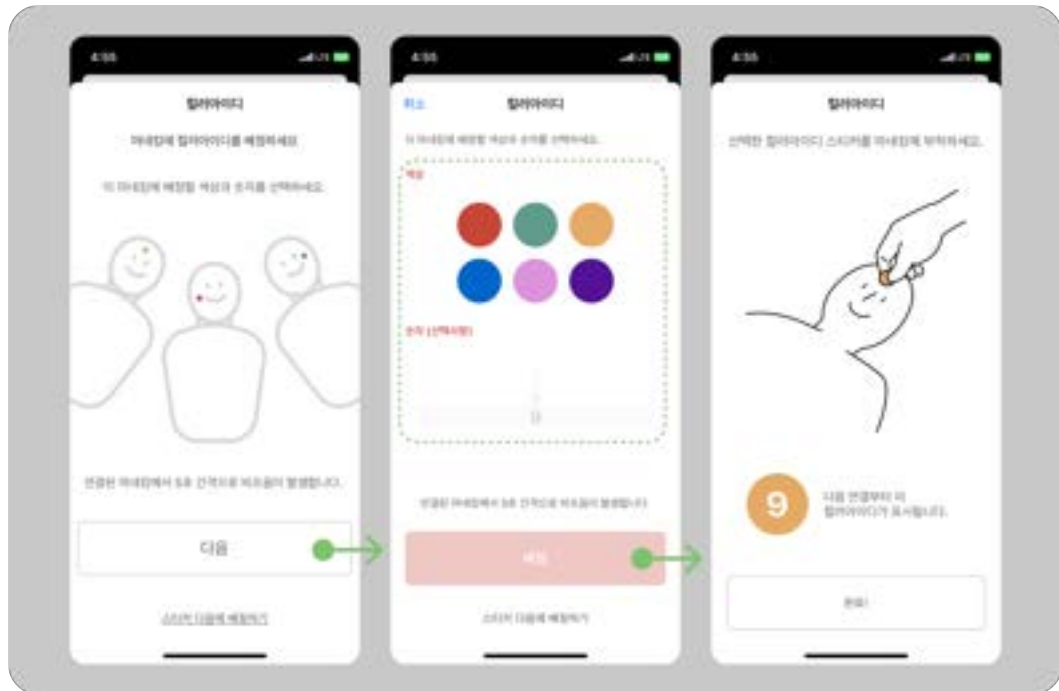

enterprise 모델일 경우 마네킹 번호를 1번 혹은 2번으로 지정해주셔야 합니다. (번호가 고정된 레이아웃으로, 다른 번호 인식 불가)

2.1.2. 초기 본체 및 소프트웨어 구성

- ① 스테이션 본체 및 스탠드를 제품 가이드대로 설치하고 전원에 연결하세요.
- ② 제공받은 CPR station 소프트웨어 설치파일(apk 또는 exe 파일)을 스테이션 본체에서 실행시켜주세요.
- ③ 설치가 완료되면 CPR station 앱을 실행하세요.
- ④ 보유하신 라이선스를 화면에 입력하세요.
- ⑤ 화면에서 표시되는 지시를 따라 초기 설정을 완료해주세요.

2.2. 제품 사용 준비

제품을 사용하기 위해 미리 다음사항을 확인하세요.

마네킹 전원 켜기

마네킹의 전원을 미리 켜 둡니다. 유선 모델의 경우 전원을 연결하면 켜집니다.

(마네킹을 깨울때 2-3초간 깊게 압박하면 삐- 소리가 납니다.)

전원 켜는 법





키오스크 전원 켜기


키오스크의 전원이 켜져있는지 확인하세요. 만약 꺼져있는 경우 전원버튼을 눌러 전원을 켜주세요.

기기가 켜지면 CPR station 소프트웨어가 실행되는지 확인하세요.

키오스크 자동 ON/OFF 설정

 일부 기기는 지원하지 않을 수 있습니다.

'메인화면' 우측 상단  버튼을 눌러 관리자 모드에 진입하세요.

하단 설정 메뉴의  버튼을 선택한 뒤 자동 전원 '켜기/끄기', '예약 시간'을 설정해주세요.

▼ 키오스크 자동 ON/OFF 설정 과정



마네킹 연결하기


미리 설정된 리스트의 마네킹이 자동으로 연결됩니다. 만약 자동으로 연결되지 않는 경우

를 참조하세요.

키오스크 음량 조절

키오스크 화면에서 손을 아래에서 위로 스와이프 해 스피커 버튼을 눌러주세요.
음량 조절 슬라이더로 음량을 조절하세요.

▼ 키오스크 음량 조절 과정

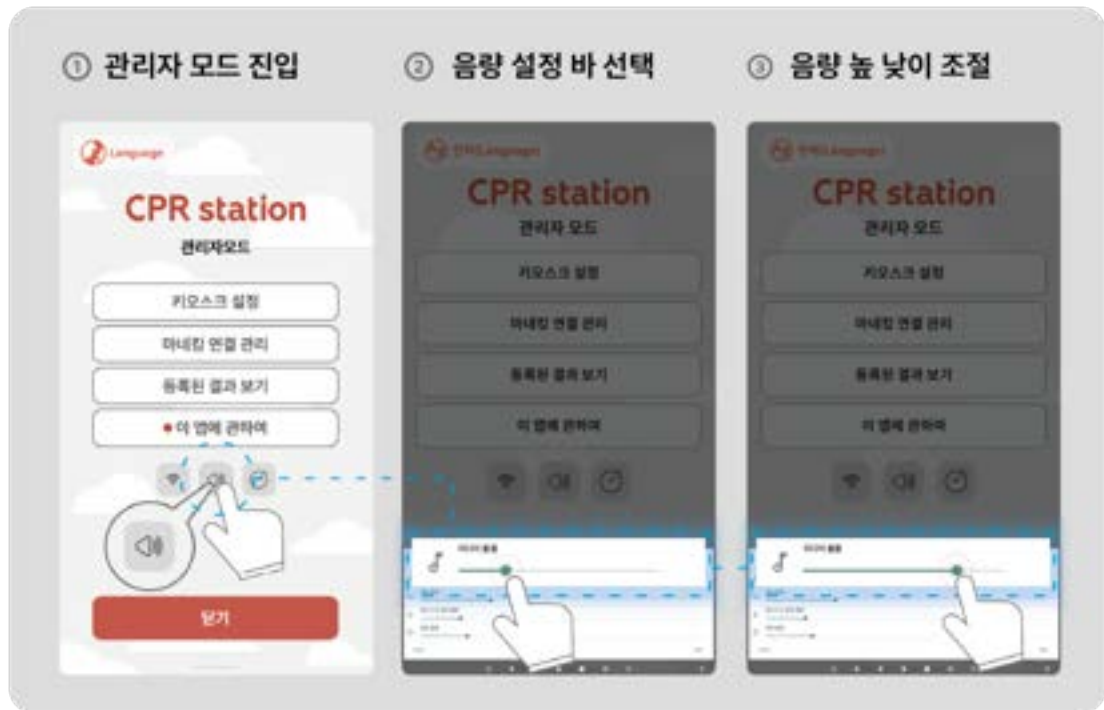



CPR station 초기설정 안내

- 3.1. 원격관리자 웹과 키오스크 연결하기
- 3.2. 기관명 + 키오스크명 설정
- 3.3. 관리자모드 비밀번호 설정
- 3.4. 관리자 모드 설정 확인 창

3.1. 원격관리자 웹과 키오스크 연결하기



① 설치 키 입력

- 키오스크를 인터넷에 연결 후 미리 안내받은 8자리의 설치 키 입력하세요.

② 관리코드 입력

- 미리 안내받은 관리코드를 입력하세요.

③ 건너뛰기 or 다음 페이지 이동

- 관리코드 초기설정을 생략하려면, 건너뛰기를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
- 관리 코드 입력했다면 다음 페이지 이동하세요.

④ 다음 페이지 이동


- 다음 페이지 이동.



관리코드 삭제

- 전에 입력된 관리자의 관리코드를 삭제하고, 키오스크와 계정의 연결을 끊습니다.
새롭게 연결을 원하는 계정의 관리코드를 입력하여 다시 연동하거나
계정연결 없이 키오스크를 단독으로 활용할 수 있습니다.

3.2. 기관명 + 키오스크명 설정

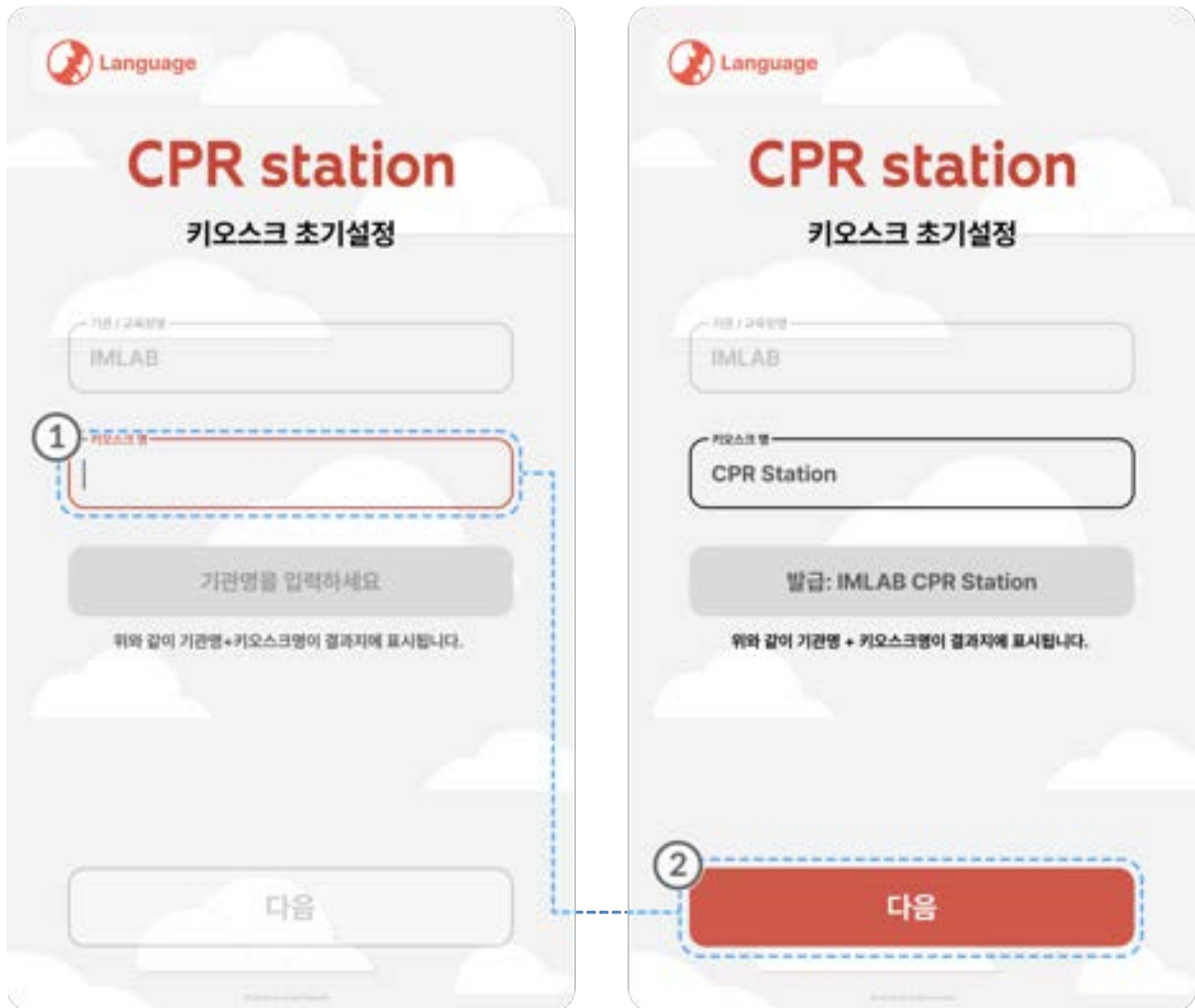

① 기관, 키오스크명 설정

- 결과지에 표시되는 기관, 교육장명 키오스크명 설정이 가능합니다. 설정된 명칭은 결과지에 표시됩니다.


② 다음 페이지 이동

- 관리자모드 진입 시 필요한 비밀번호 설정 페이지로 이동합니다.

- 기관 / 교육장명 은 관리코드 등록 시 관리코드에 입력된 정보가 자동 입력됩니다. 추후 변경을 희망하시면

관리자 웹 클라우드 에 로그인 후 설정에서 이름을 변경 해주세요.

3.3. 관리자모드 비밀번호 설정

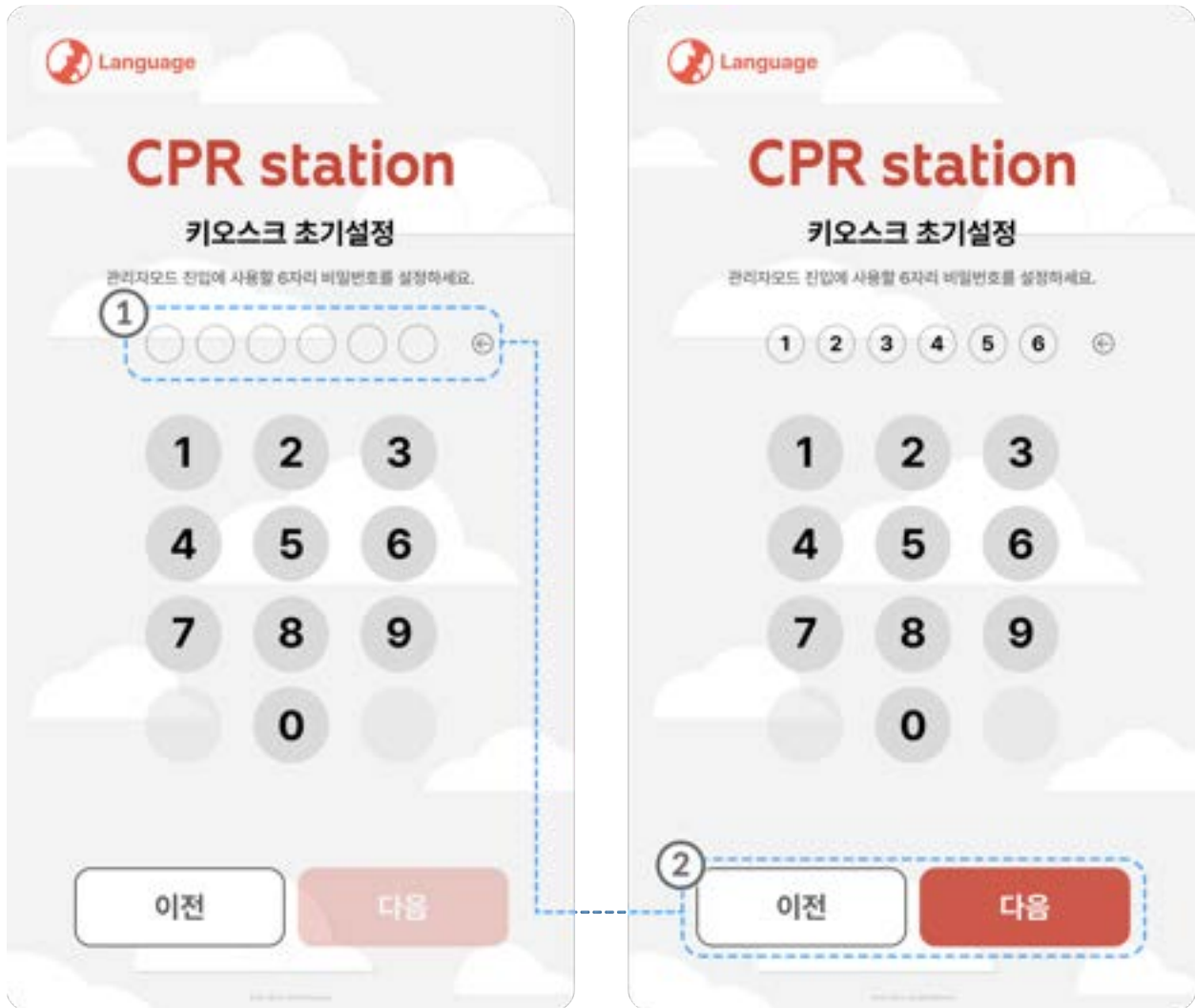

① 관리자모드 진입 비밀번호 설정

- 관리자모드에 진입에 사용할 6자리 비밀번호를 설정합니다.


② 이전 or 다음

- 이전 기관명 + 키오스크명 설정 페이지로 돌아가려면 이전 버튼을 누르세요.
- 관리자모드 비밀번호는 처음 앱을 설정할 때 사용자가 직접 지정합니다.

미리 세팅되어 설치가 완료된 상태에서 제품을 받으신 경우에는

초기비밀번호 000000 으로 진행하신 후 비밀번호를 변경하세요.

3.4. 관리자 모드 설정 확인 창

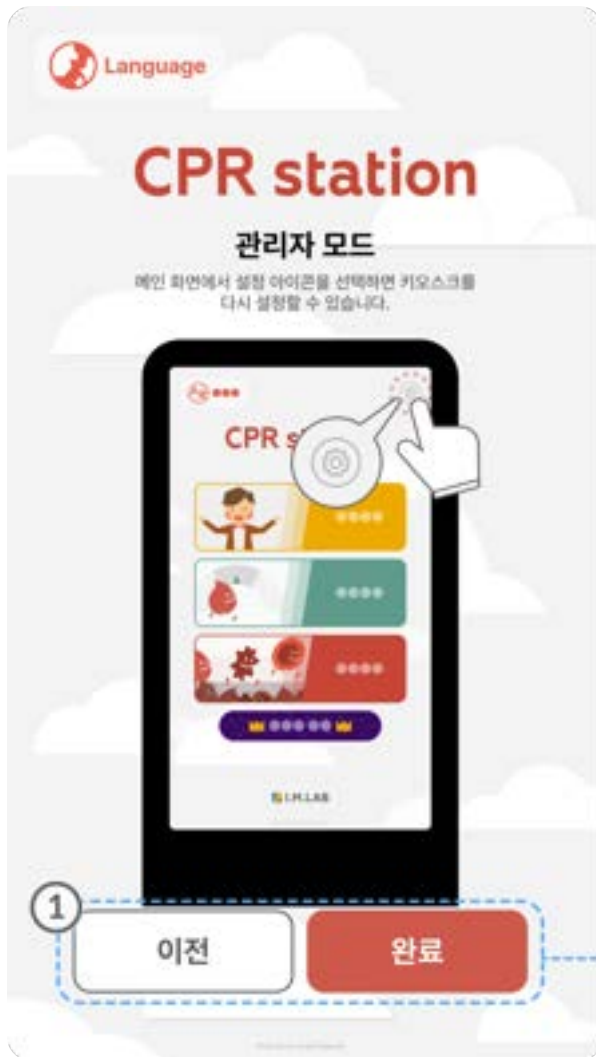

① 이전 or 완료

- 이전 관리자모드 비밀번호 설정 페이지로 돌아가려면 이전 버튼을 누르세요.

② 설정 확인 팝업 창

- 앞서 설정된 명칭과 비밀번호를 확인합니다.
- 이전 관리자모드 진입 비밀번호 설정 페이지로 돌아가려면 닫기 버튼을 눌러 팝업 창을 닫고 이전 버튼을 누르세요.
- 키오스크 초기 설정을 완료하려면 팝업 창의 확인을 눌러주세요.



CPR station 주요 기능

[3.1. 화면보호기](#)

[3.2. 메인화면](#)

[교육 콘텐츠 선택](#)

[3.3. 학습모드](#)

[3.3.1 비디오 학습](#)

[3.3.2 CPR 퀴즈](#)

[3.3.3 자동심장충격기](#)

[3.4. 연습 모드](#)

[3.4.1. 심폐소생술 연습모드](#)

[3.4.2. 다중 사용자의 결과 모아보기](#)

[3.4.3. 연습모드 결과 상세페이지](#)

[3.4.4. 연습모드 결과 내보내기](#)

[3.5. 자동심장충격기 연습모드](#)

[3.5. 랭킹 모드](#)

[3.5.1. 다중 사용자의 결과 모아보기](#)

[3.5.2. 랭킹모드 결과 상세페이지](#)

[3.5.3. 랭킹모드 결과 내보내기](#)

[3.6. 명예의 전당](#)

3.1. 화면보호기

사용자의 입력 없이 10분이 경과하면 화면보호기가 표시됩니다.
화면을 터치하면 메인화면이 표시되어 학습을 시작할 수 있습니다.

3.2. 메인화면



국문&영문 선택

Ⓐ 언어 변경

버튼을 눌러 원하는 언어로 변경할 수 있습니다.

관리자 모드 선택

Ⓑ 관리자 모드

버튼을 눌러 키오스크의 세부 설정을 변경하거나 지원을 요청할 수 있습니다.

교육 콘텐츠 선택

㉔ 학습모드

심폐소생술 학습

3분 내외의 영상 클립으로 심폐소생술 개념과 순서, 수행 방법에 대해 배울 수 있습니다.

CPR 퀴즈

학습 이후 간단한 퀴즈를 풀며 심폐소생술에 대한 개념을 올바르게 숙지했는지 점검해 볼 수 있습니다.

자동심장충격기 학습

자동심장충격기 개념과 순서, 수행 방법에 대해 배우며, 숙지할 수 있습니다.

㉕ 연습 모드

심폐소생술 연습

Station 에 함께 장비된 마네킹 또는 cprCUBE로 직접 심폐소생술을 실습해 봅니다.

자동심장충격기 연습

키오스크 화면을 통해 직접 AED 과정을 실습해봅니다.

E 랭킹 모드

정해진 기준(시간/횟수)의 심폐소생술을 수행하여 누가 더 잘 수행했는지 겨뤄보는 모드입니다. 실습이 끝나면 사용자의 누적 순위를 보여줍니다.

F 명예의 전당

'랭킹모드'에 도전하여 실력을 겨루고 자신의 순위를 확인해 볼 수 있습니다.



메인화면 상단 우측의 설정을 터치하여 관리자모드에 진입합니다.

관리자모드 비밀번호는 처음 앱을 설정할 때 사용자가 직접 지정합니다. 미리 세팅되어 설치가 완료된 상태에서 제품을 받으신 경우에는 초기비밀번호 000000으로 진행하신 후 비밀번호를 변경하세요.

설정 항목에 대한 상세한 설명은 [4.키오스크 설정](#) 항목으로 이동하세요.



3.3. 학습모드

3.3.1 비디오 학습



A 영상 콘텐츠 네비게이션바

영상의 진행률을 네비게이션바로 확인할 수 있습니다.

- 원형의 북마크를 선택하면 해당 위치로 이동합니다.

B 동영상 컨트롤 패널

- ⏭ 앞으로 10초 이동
- ⏮ 뒤로 10초 이동
- ⏸ 일시정지 / 재생
- ⏹ 비디오 학습 종료

3.3.2 CPR 퀴즈



정답 시



정답 표시

오답 제출 시



선택한 답(오답)



정답



'제출하기'를 누르면, 정답과 함께 해설 내용을 확인할 수 있습니다.

3.3.3 자동심장충격기



A 영상 콘텐츠 네비게이션바
 영상의 진행률을 네비게이션바로 확인할 수 있습니다.

- B** 동영상 컨트롤 패널
- ← 이전 스텝으로 이동
 - 다음 스텝으로 이동
 - 🏠 메인 화면으로 이동

3.4. 연습 모드

3.4.1. 심폐소생술 연습모드

1인 사용자



- (A) 이완 피드백**

 - 이완이 부족할 경우 빨간색
 - 이완이 적절할 경우 초록색

- (B) 실시간 압박 깊이**

- (C) 실시간 속도 피드백**

 - 적정 속도인 100~120회/분 구간 초록색
 - 100회/분 미만, 120회/분 초과 시 빨간색

- (D) 최대 압박 깊이**

 - 최대 압박 깊이 5~6cm 구간 초록색
 - 최대 압박 깊이 이상 혹은 이하 구간 빨간색

- (E) 피드백 요약 인디케이터**

 - 압박 요소에 대한 요약적 텍스트 피드백

- (F) 압박&압박성공 횟수 카운터**


㉔ 타이머(카운트 다운)

㉕ 가슴압박 방법 가이드라인

- 심폐소생술 자세, 압박 위치, 손 모양 등에 대한 가이드

다중 사용자 PRO

최대 1~4대 까지의 그룹 결과는 PRO 버전에서만 확인할 수 있습니다.

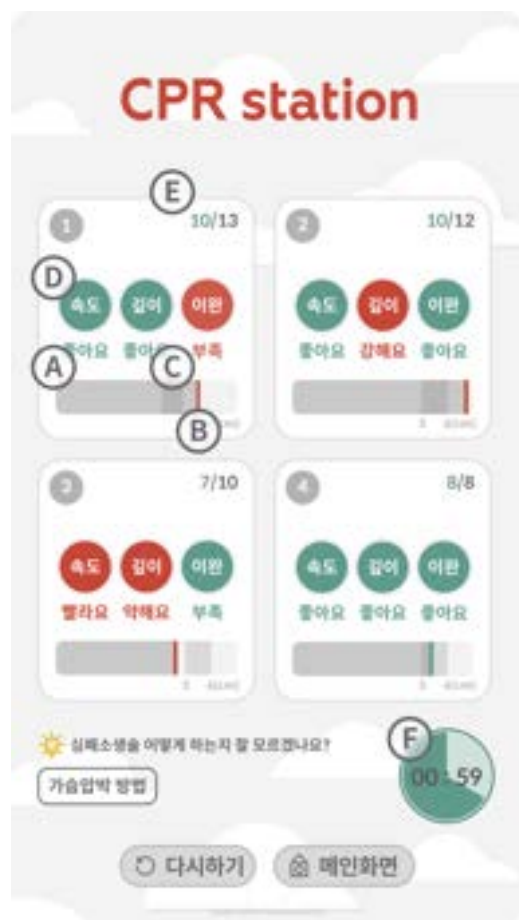

㉖ 이완 피드백

- 이완이 부족할 경우 빨간색
- 이완이 적절할 경우 초록색

㉗ 실시간 압박 깊이

㉘ 최대 압박 깊이

- 최대 압박 깊이 5~6cm 구간 초록색
- 최대 압박 깊이 이상 혹은 이하 구간 빨간색


- ④ 피드백 요약 인디케이터
 - 압박 요소에 대한 요약적 텍스트 피드백

 - ⑤ 압박&압박성공 횟수 카운터

 - ⑥ 타이머(카운트 다운)
-

3.4.2. 다중 사용자의 결과 모아보기

PRO 최대 1~4대 까지의 그룹 결과는 PRO 버전에서만 확인할 수 있습니다.

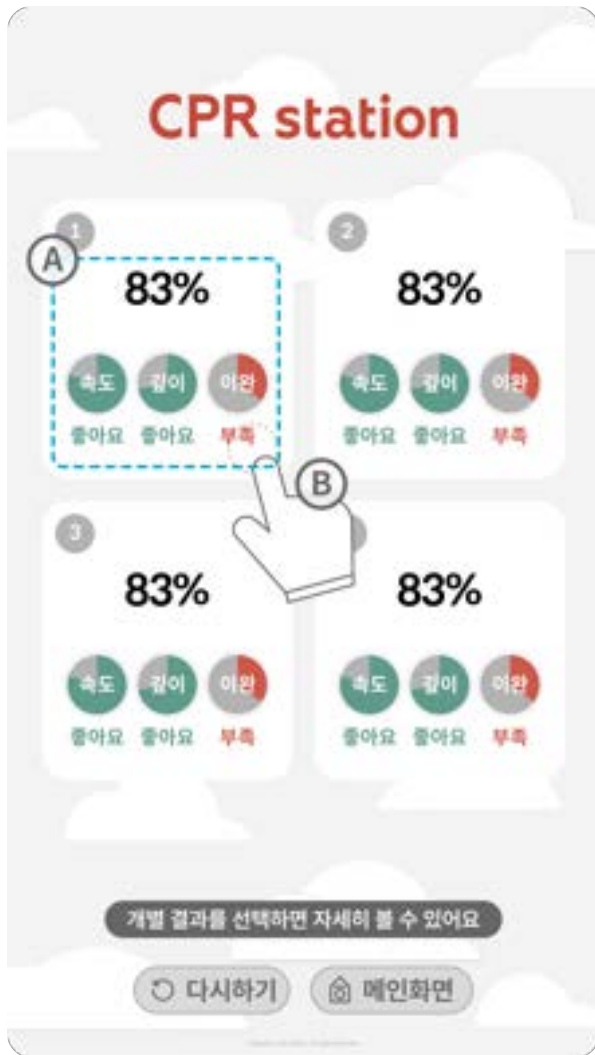

Ⓐ 종합 결과

- 교육생 닉네임, 총점, 평균 속도, 평균 깊이, 이완에 대한 종합 실습 내용

Ⓑ 상세 결과 보기

- 결과 요약 페이지를 터치하면 상세하게 확인할 수 있는 상세페이지로 이동

3.4.3. 연습모드 결과 상세페이지



- Ⓐ 결과 정보

 - 교육생 닉네임 수정, 소요시간, 날짜, 총점의 기록을 확인 가능
- Ⓑ 종합 결과

 - 교육생의 평균 속도, 평균 깊이, 이완에 대한 점수를 수치 정보로 확인 가능
- Ⓒ 결과 내보내기 버튼


 - 교육 결과를 QR코드로 스마트폰, 태블릿PC로 저장 및 공유

3.4.4. 연습모드 결과 내보내기



1. 결과 내보내기 버튼 선택
2. 팝업된 QR코드 '카메라 앱'으로 확인
3. 결과 페이지 링크 선택
4. 결과 확인하고, 내려 받기 버튼 선택
5. 다운로드 확인 후 기본 '갤러리 앱'에서 결과 확인


3.5. 자동심장충격기 연습모드

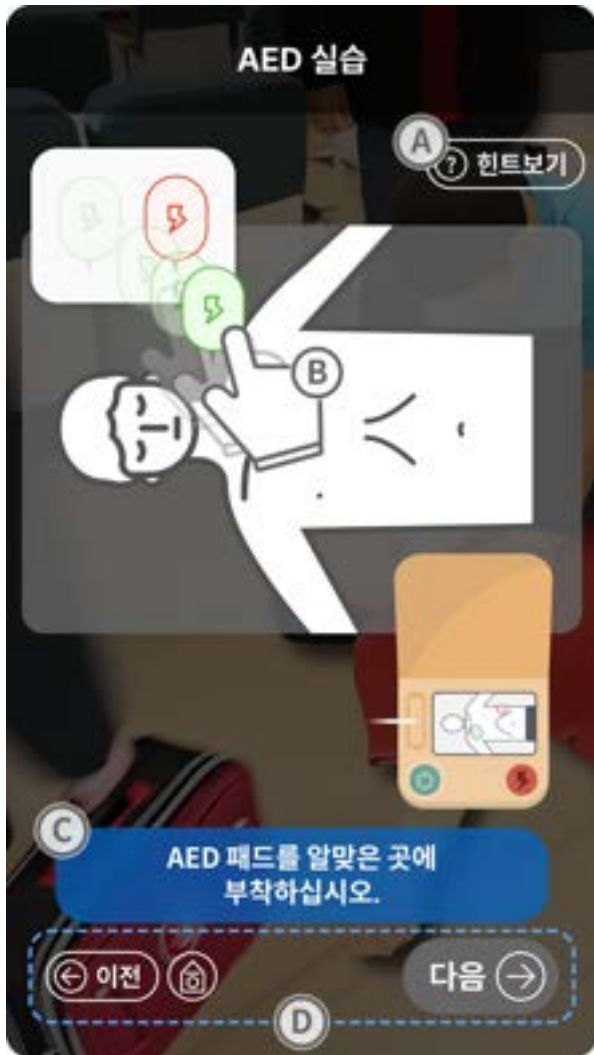

- Ⓐ 힌트 보기
 - AED 사용법 요약 가이드
- Ⓑ 실습 컨트롤
- Ⓒ 단계별 실습 행동 안내
 - 학습 단계에 맞추어 해야할 행동에 대한 가이드 문구
- Ⓓ 실습 컨트롤 패널
 - ⏪ 이전 스텝으로 이동
 - 🏠 메인 화면으로 이동
 - ⏩ 다음 스텝으로 이동

3.5. 랭킹 모드


1인 사용자

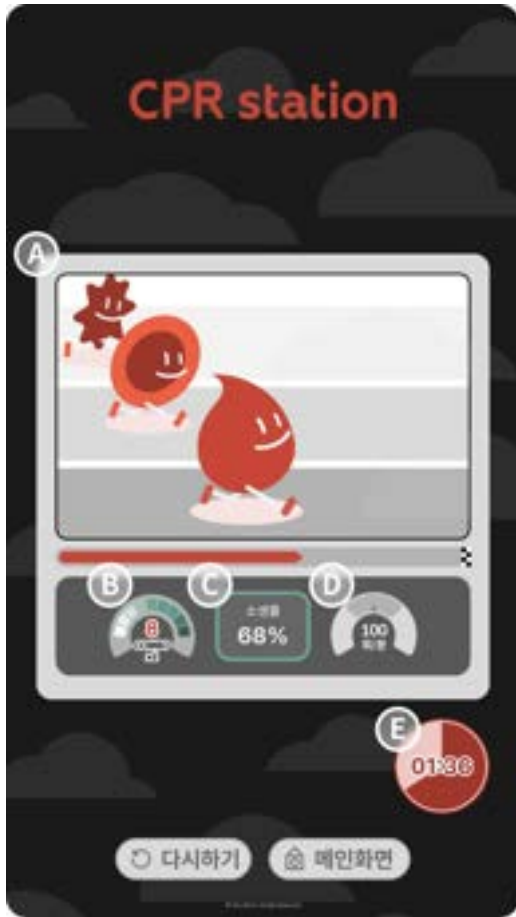

- Ⓐ 레이싱 애니메이션
- Ⓑ 콤보 게이지
- Ⓒ 소생률 계기판
- Ⓓ 실시간 속도 피드백
 - 적정 속도인 100~120회/분 구간 초록색
 - 100회/분 미만, 120회/분 초과 시 빨간색
- Ⓔ 타이머(카운트 다운)

2인 사용자 PRO


최대 1~4대 까지의 그룹 결과는 PRO 버전에서만 확인할 수 있습니다.

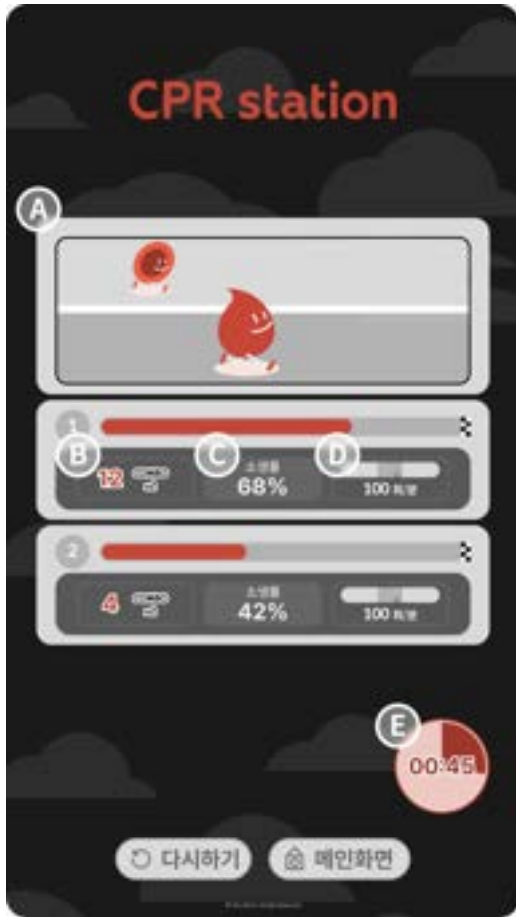

- Ⓐ 레이싱 애니메이션
- Ⓑ 콤보 게이지
- Ⓒ 소생률 계기판
- Ⓓ 실시간 속도 피드백
 - 적정 속도인 100~120회/분 구간 초록색
 - 100회/분 미만, 120회/분 초과 시 빨간색
- Ⓔ 타이머(카운트 다운)

3-4인 사용자 PRO


최대 1~4대 까지의 그룹 결과는 PRO 버전에서만 확인할 수 있습니다.

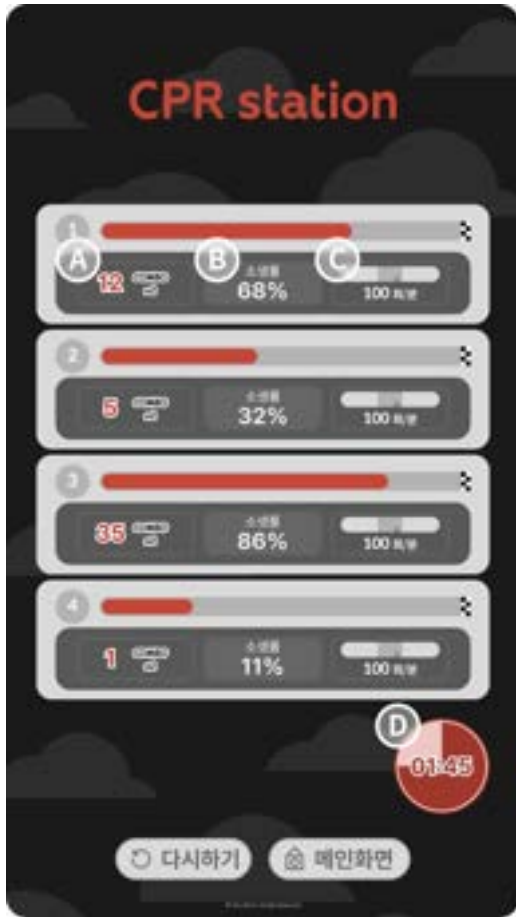

- Ⓐ 콤보 게이지
- Ⓑ 소생률 계기판
- Ⓒ 실시간 속도 피드백
 - 적정 속도인 100~120회/분 구간 초록색
 - 100회/분 미만, 120회/분 초과 시 빨간색
- Ⓓ 타이머(카운트 다운)

3.5.1. 다중 사용자의 결과 모아보기

PRO 최대 1~4대 까지의 그룹 결과는 PRO 버전에서만 확인할 수 있습니다.

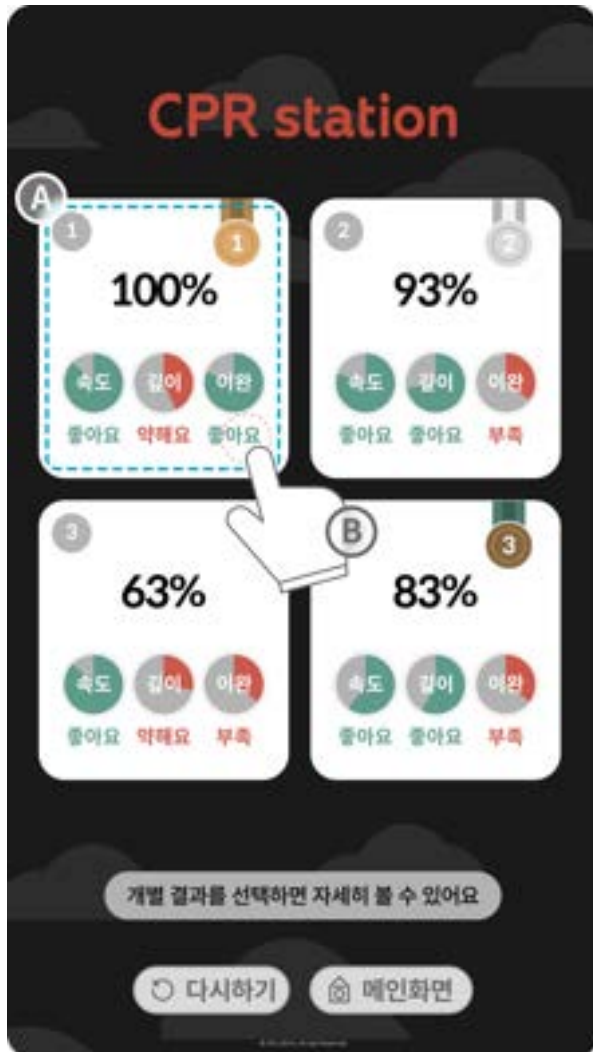

Ⓐ 종합 결과

- 교육생 닉네임, 총점, 평균 속도, 평균 깊이, 이완에 대한 종합 실습 내용

Ⓑ 상세 결과 보기

- 결과 요약 페이지를 터치하면 상세하게 확인할 수 있는 상세페이지로 이동

3.5.2. 랭킹모드 결과 상세페이지



- Ⓐ 그룹별 랭킹 정보

 - 세계별, 그룹별, 동일기기별 랭킹을 확인 가능

- Ⓑ 결과 정보

 - 교육생 닉네임 수정, 소요시간, 날짜, 총점의 기록을 확인 가능

- Ⓒ 상세 결과 내용

 - 교육생의 평균 속도, 평균 깊이, 이완에 대한 점수를 수치 정보로 확인 가능

- Ⓓ 결과 내보내기 버튼

 - 교육 결과를 QR코드로 스마트폰, 태블릿PC로 저장 및 공유

3.5.3. 랭킹모드 결과 내보내기



1. '결과 내보내기' 버튼 선택
2. 팝업된 QR코드 '카메라 앱'으로 확인
3. 결과 페이지 링크 선택
4. 결과 확인하고, 내려 받기 버튼 선택
5. 다운로드 확인 후 기본 '갤러리 앱'에서 결과 확인

*위 QR코드를 '카메라 앱'으로 보면, 결과 샘플을 확인할 수 있습니다.

3.6. 명예의 전당



'랭킹모드'에 도전하여 실력을 겨루고 자신의 순위를 확인해 보세요.

사용자에게 지속적인 학습 동기를 부여하고 재미를 더해 효과적인 CPR 훈련을 가능하게 합니다.



관리자 모드 (키오스크 설정)

[4.1. 세팅 페이지 접근](#)

[4.2. 설정 메인](#)

[4.3. 키오스크 설정](#)

[4.3.1. 기관명 / 키오스크명 설정](#)

[4.3.2. 관리자 비밀번호 변경](#)

[4.3.3. 관리코드 입력](#)

[4.4. 마네킹 연결 관리](#)

[4.5. 등록된 결과 보기](#)

[4.6. 이 앱에 관하여](#)

4.1. 세팅 페이지 접근



초기 설정 이후 관리자모드 진입 시
메인화면 상단 우측의 설정을 터치해 관리자모드에 진입합니다.

관리자모드 비밀번호는 처음 앱을 설정할 때 사용자가 직접 지정합니다.

미리 세팅되어 설치가 완료된 상태에서 제품을 받으신 경우에는 초기비밀번호 000000으로 진행하신 후 비밀번호를 변경하세요.

4.2. 설정 메인



Ⓐ 키오스크 설정

- 기관과 키오스크의 명칭을 수정할 수 있습니다.
- 관리자모드 진입에 필요한 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
- 원격 관리자 웹 접근을 위한 관리코드를 입력하거나 변경할 수 있습니다.

Ⓑ 마네킹 연결 관리

- 관리자모드 진입에 필요한 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

Ⓒ 간단 결과 뷰어

- 키오스크에서 생성된 결과를 간단한 데이터베이스로 볼 수 있습니다. 키오스크가 오프라인 상태라면 세션 후 결과 공유하기(QR스캔)한 결과만 누적됩니다.

Ⓓ 이 앱에 관하여

- 앱의 버전과 기본 정보를 제공합니다. 사용자 메뉴얼 및 일부 지원 옵션이 포함되어 있습니다.

ⓔ 키오스크 설정 아이콘

- 와이파이 연결 설정
- 키오스크 음량 조절 설정
- 키오스크 on/off 설정

ⓕ 관리자 페이지 닫기 (홈으로 이동)

4.3. 키오스크 설정



A 기관명/키오스크명 설정

- 기관명과 키오스크명을 확인하고 변경할 수 있습니다.
관리코드가 연결된 경우 기관명은 관리자의 소속 정보로 설정됩니다.

B 관리자 비밀번호 변경

- 관리자 페이지 진입 시 필요한 비밀번호를 변경합니다.

㉔ 관리코드 입력

- 현재 연결된 원격관리자 계정의 관리코드를 표시합니다.
관리자 정보를 확인하거나 관리자를 변경할 수 있습니다.

㉕ 닫기 버튼

- 키오스크 설정을 중단하고 설정페이지 메인으로 이동합니다.

4.3.1. 기관명 / 키오스크명 설정



(A) 키오스크명 변경 설정

- 기관명 / 키오스크명 입력 변경 및 설정하면 결과지에 변경된 명칭이 표시됩니다.

(B) 이전 이동

- 설정페이지 메인으로 이동합니다.

4.3.2. 관리자 비밀번호 변경



(A) 관리자 비밀번호 변경

- 관리자 진입에 사용될 6자리 비밀번호 입력 가능

(B) 이전 이동

- 설정페이지 메인으로 이동합니다.

4.3.3. 관리코드 입력



Ⓐ 관리코드 삭제


- 기존에 입력된 관리코드 삭제 하고 새롭게 연결을 원하는 계정의 관리코드를 입력하여 다시 연동하거나 계정연결 없이 키오스크를 단독으로 활용할 수 있습니다.

Ⓑ 이전 이동

- 설정페이지 메인으로 이동합니다.

4.4. 마네킹 연결 관리

PRO PRO 모델의 경우 마네킹 연결 4대까지 연결 가능합니다. 일반 모델의 경우 한번에 한대만 연결가능합니다.

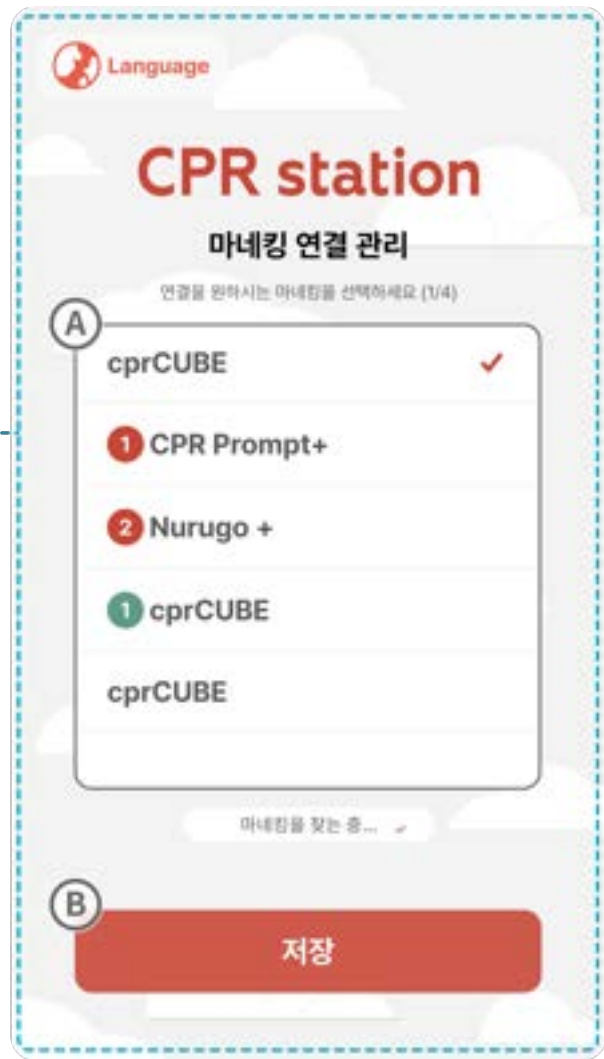

(A) 마네킹 선택 및 연결


- 마네킹을 선택해 연결합니다.

(B) 마네킹 연결 저장

- 저장을 누르면 연결된 마네킹을 기억하고, 다음 기기 시작 시 마네킹이 켜져 있다면 자동으로 연결합니다.

4.5. 등록된 결과 보기



 관리자 ID 가입하지 않아도 사용할 수 있습니다.

(A) 등록된 결과 보기 순서

1. 팝업된 QR코드 '카메라 앱'으로 확인
2. 결과 페이지 링크 선택
3. 분류별 결과 확인하기

(B) 닫기

- 이전 페이지 이동 합니다.

㉔ 웹 데이터베이스

- 등록된 결과를 모두보기, 연습모드만 보기, 랭킹모드만 보기 버전으로 분류해 볼 수 있습니다.
- 인터넷이 연결되지 않은 상황에서는, 키오스크 사용자가 QR스캔으로 등록된 결과만 누적됩니다.

4.6. 이 앱에 관하여



Ⓐ 업데이트 내용 확인

키오스크 최신 버전 확인 및 버전 업데이트가 가능합니다.

Ⓑ 메뉴얼 보기 순서

1. 팝업된 QR코드 '카메라 앱'으로 확인
2. 메뉴얼 페이지 링크 선택
3. 메뉴얼 확인하기


Ⓒ 원격 지원

- 원격지원 요청 후 약속시간에 확인을 눌러 온라인 지원을 받습니다.

(원격 지원을 위해 인터넷 연결이 필요합니다.)

Ⓓ 닫기


- 앱 정보 페이지를 닫고
이전 관리자 페이지로 이동합니다.

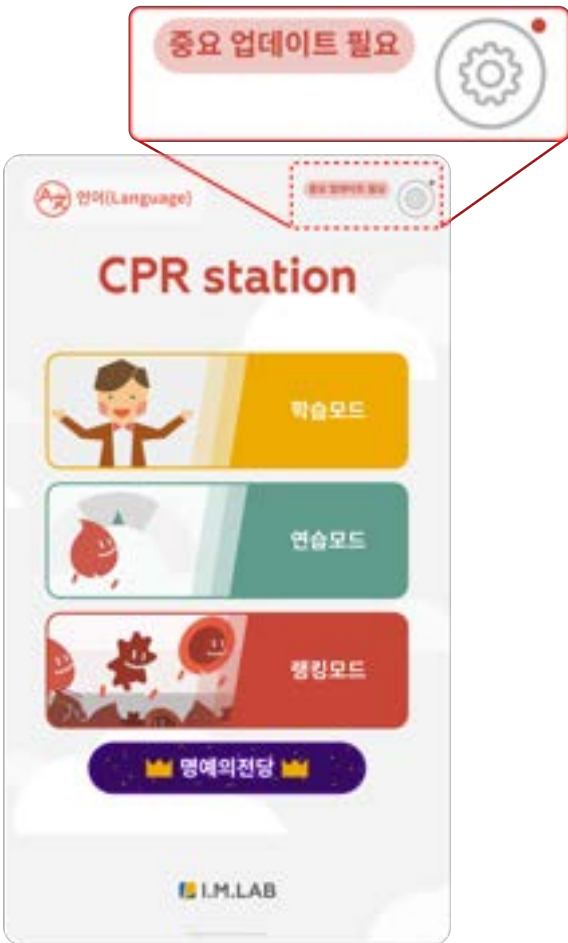

중요 업데이트 필요할 시 메인 홈에서 이미지와 같이 알림 표시가 나타납니다.

위 방법과 같이 관리자 모드에 진입 후

'이 앱의 관하여' 설정에서 업데이트를 진행해주세요.

 일부 내용은 자동 업데이트를 진행합니다.



원격 관리용 웹 안내

5.1. 로그인 페이지

5.1.1. 스테이션 관리코드 미 입력 시

5.2. 메인[홈] 탭

5.2.1. CPR station별 사용 현황

5.3. [통합 결과] 탭

5.3.1. 전체 결과보기 및 다운로드


5.4. [스테이션] 탭

5.4.1. 스테이션 상태 보기

5.5. 사용자 계정 설정

5.5.1. 사용자 계정 변경

5.1. 로그인 페이지

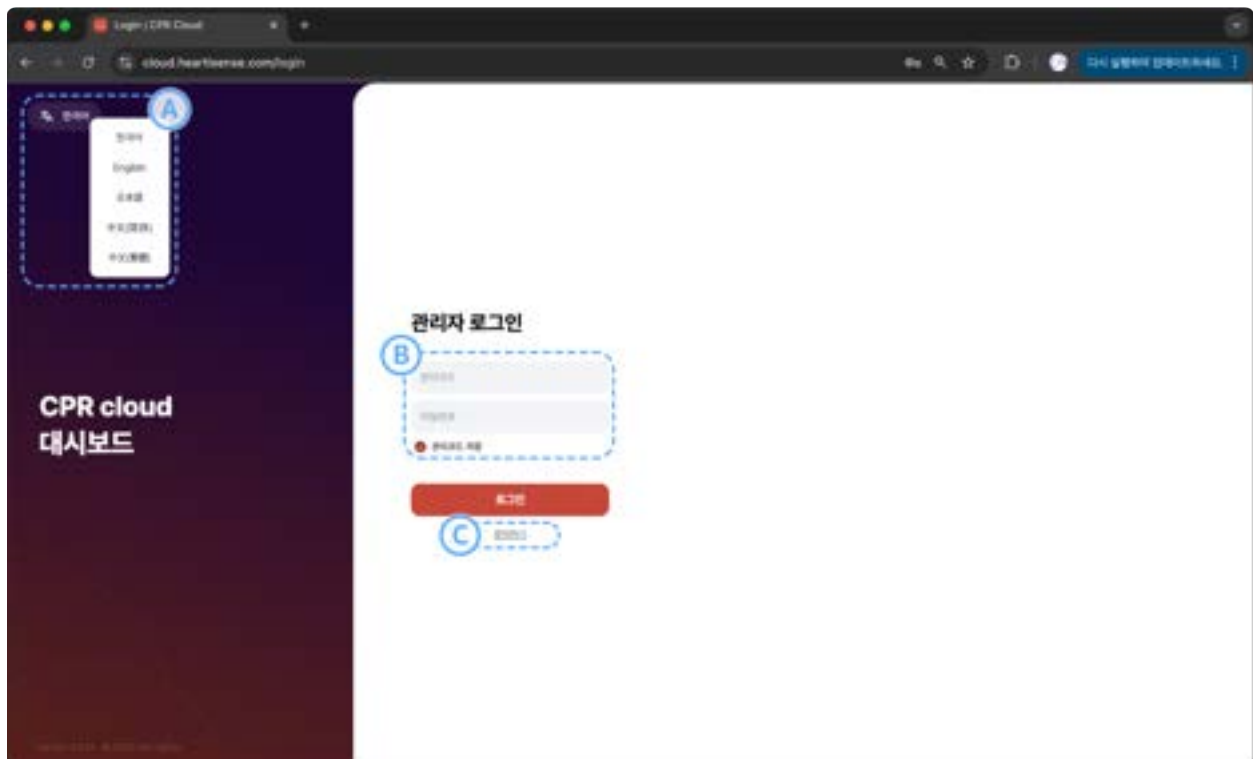



초기 설정에서 관리코드 QR 스캔 시 Web 관리자 로그인 페이지로 이동합니다.



A 언어 변경

- 버튼을 눌러 원하는 언어로 변경할 수 있습니다.



B 로그인

- 관리코드 / 비밀번호를 기입해 발급받은 계정에 로그인을 진행합니다.



C 문의하기

- 관리코드를 잊은 경우 → 문의하기 버튼을 클릭해 이메일 문의를 남깁니다.

5.1.1. 스테이션 관리코드 미 입력 시





미리 설정된 스테이션의 상태가 자동으로 연결됩니다. 만약 스테이션이 연결되지 않아 해당 화면이 뜨는 경우 발급받은 관리 코드를 키오스크 내 등록해주세요. 등록 방법은

▣ [관리자 모드 \(키오스크 설정\)](#) 를 참조하세요.



① 설정 페이지 진입

- 설정 탭을 눌러 관리자 정보가 있는 설정 탭으로 진입합니다.



② 관리 코드 확인

- 관리자 정보 내 자신의 관리 코드를 확인 할 수 있습니다.
- 로그인 시 입력했던 관리 코드와 동일합니다.



③ 관리 코드 복사

- 관리 코드의 우측 탭을 클릭하면, 관리코드가 클립보드에 복사 됩니다.
이후 관리코드를 키오스크 내 등록해주세요.



스테이션을 계정에 연결하지 않더라도 오프라인에서 여전히 사용할 수 있습니다. 언제든지 스테이션에 관리코드를 입력하면 결과가 동기화됩니다.

5.2. 메인[홈] 탭





A 상단 메인 메뉴바

- web 페이지 내 '홈 / 통합결과 / 스테이션' 결과 화면 페이지로 이동 할 수 있습니다.

B 계정 관리 탭

- 로그인한 계정을 로그아웃 하거나 편집이 가능한 페이지 입니다.


C 전체 CPR station 현황

- 이용자 수를 일간, 주간, 월간 수로 표기해 이용자 수의 증가, 감소 현황을 확인 가능합니다.
- 주요 기능, 온/오프라인, 버전별 현황을 확인 가능합니다.
- 최근 기기 사용량 데이터를 그래프로 한눈에 볼 수 있습니다.

D CPR station 랭킹 현황

- 기기별 이용자 수의 데이터를 기준별 그래프로 한눈에 볼 수 있습니다.

5.2.1. CPR station별 사용 현황

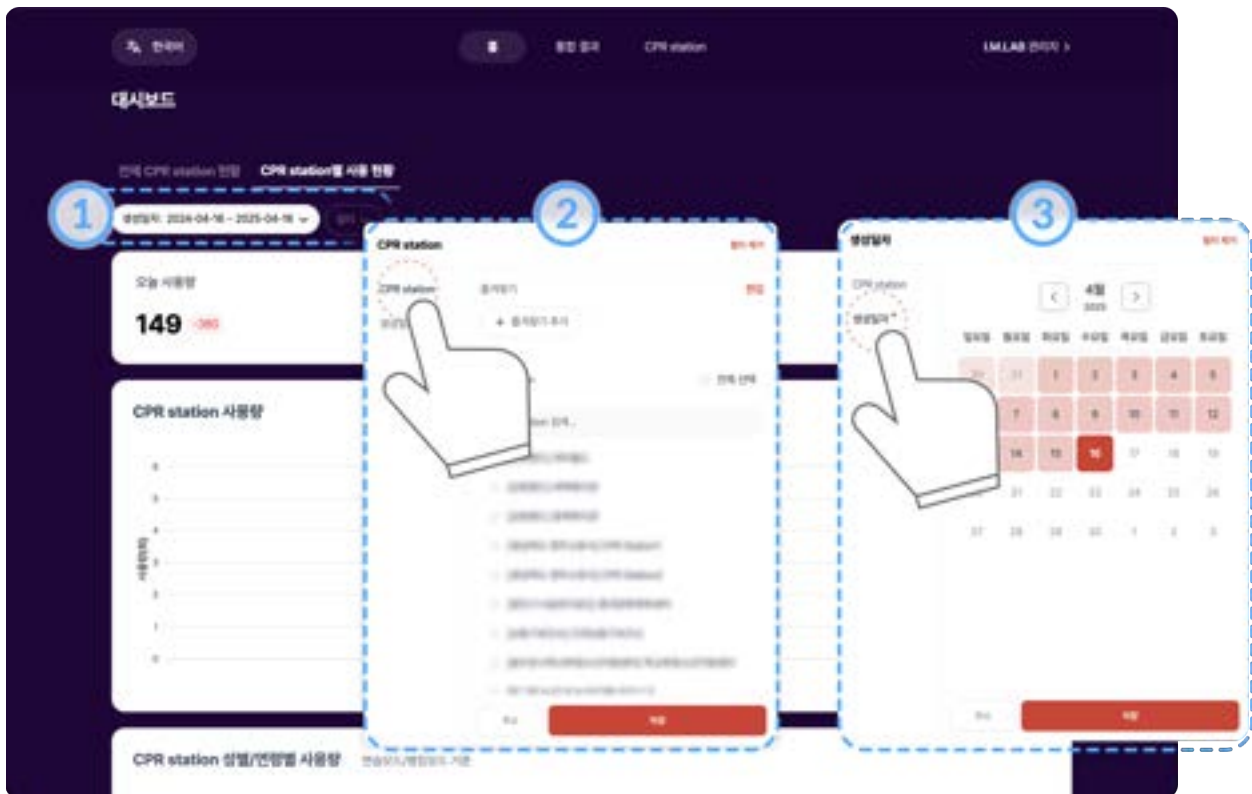

① 생성일자 및 필터 설정 탭 선택

- 설정 탭을 눌러 설정 탭 팝업창으로 진입합니다.

② CPR station 필터

- 관리하는 기기를 필터링을 할 수 있습니다.
- 자주 확인하는 기기를 + 즐겨찾기 추가 할 수 있습니다.

③ 생성일자 필터

- 생성일자를 선택해 기간별 필터링을 할 수 있습니다.
이후 설정한 필터를 저장해주세요.

5.3. [통합 결과] 탭

5.3.1. 전체 결과보기 및 다운로드



전체 결과에서는 랭킹과 평가 기준에 관계 없이 모든 결과가 표시됩니다.

Ⓒ 전체 결과 CSV 다운로드

- 확인했던 파일을 내보내고 싶다면, 'CSV 다운로드' 탭을 클릭해 데이터를 CSV 형식으로 다운로드 및 내보내기가 가능합니다.

Ⓓ 페이지당 결과 값 수 설정

- 사용자가 페이지당 확인하려는 결과 값의 수를 선택하여 볼 수 있습니다.

5.4. [스테이션] 탭

5.4.1. 스테이션 상태 보기

CPR station 관리

| CPR station ID | 이름 | 온/오프라인 | 마케팅 연결 상태 | 위치 | 담당자 | 비고 | 제출자 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|-----|---------|-----|
| 000001 | CPR Station | 온라인 2025. 04. 16. 11:12:32 | 연결 Manage | 서울특별시 강남구 테헤란로 123 | 김민준 | 411 | ▶ |
| 000002 | 홍익대학교 캠퍼스 CPR Station | 온라인 2025. 04. 16. 11:11:56 | 연결 | 서울특별시 강남구 테헤란로 123 | 김민준 | 2,32 | ▶ |
| 000003 | 홍익대학교 캠퍼스 CPR Station | 온라인 2025. 04. 16. 11:10:42 | 연결 | 서울특별시 강남구 테헤란로 123 | 김민준 | 311,411 | ▶ |
| 000004 | CPR Station | 온라인 2025. 04. 16. 11:10:25 | 연결 | 서울특별시 강남구 테헤란로 123 | 김민준 | 3,21 | ▶ |
| 000005 | CPR Station | 온라인 2025. 04. 16. 11:12:28 | 연결 | 서울특별시 강남구 테헤란로 123 | 김민준 | 411 | ▶ |
| 000006 | CPR Station | 온라인 2025. 04. 16. 11:12:26 | 연결 | 서울특별시 강남구 테헤란로 123 | 김민준 | 411 | ▶ |
| 000007 | CPR Station | 온라인 2025. 04. 16. 11:11:56 | 연결 | 서울특별시 강남구 테헤란로 123 | 김민준 | 411 | ▶ |
| 000008 | CPR Station | 온라인 2025. 04. 16. 11:12:26 | 연결 | 서울특별시 강남구 테헤란로 123 | 김민준 | 311,411 | ▶ |
| 000009 | CPR Station | 온라인 2025. 04. 16. 11:11:13 | 연결 | 서울특별시 강남구 테헤란로 123 | 김민준 | 411 | ▶ |
| 000010 | CPR Station | 온라인 2025. 04. 16. 11:11:42 | 연결 | 서울특별시 강남구 테헤란로 123 | 김민준 | 311,411 | ▶ |

A 관리중인 키오스크 ID / 이름 확인

- 내가 관리하는 키오스크 ID / 이름 별로 한눈에 확인이 가능합니다.

B 키오스크, 마케팅 연결상태 확인

- 관리중인 키오스크의 온/오프라인 여부, 마케팅 연결 상태를 확인 가능합니다.


Ⓒ 위치, 담당자, 버전 상태 확인

- 키오스크 설치 위치, 담당자, 버전을 각각 확인 할 수 있습니다.

Ⓓ 기기별 현장 담당자에게 메시지 보내기

- 관리자가 스테이션의 상태에 이상이 보일 시 현장 담당자에게 메시지를 보낼 수 있습니다.

5.5. 사용자 계정 설정

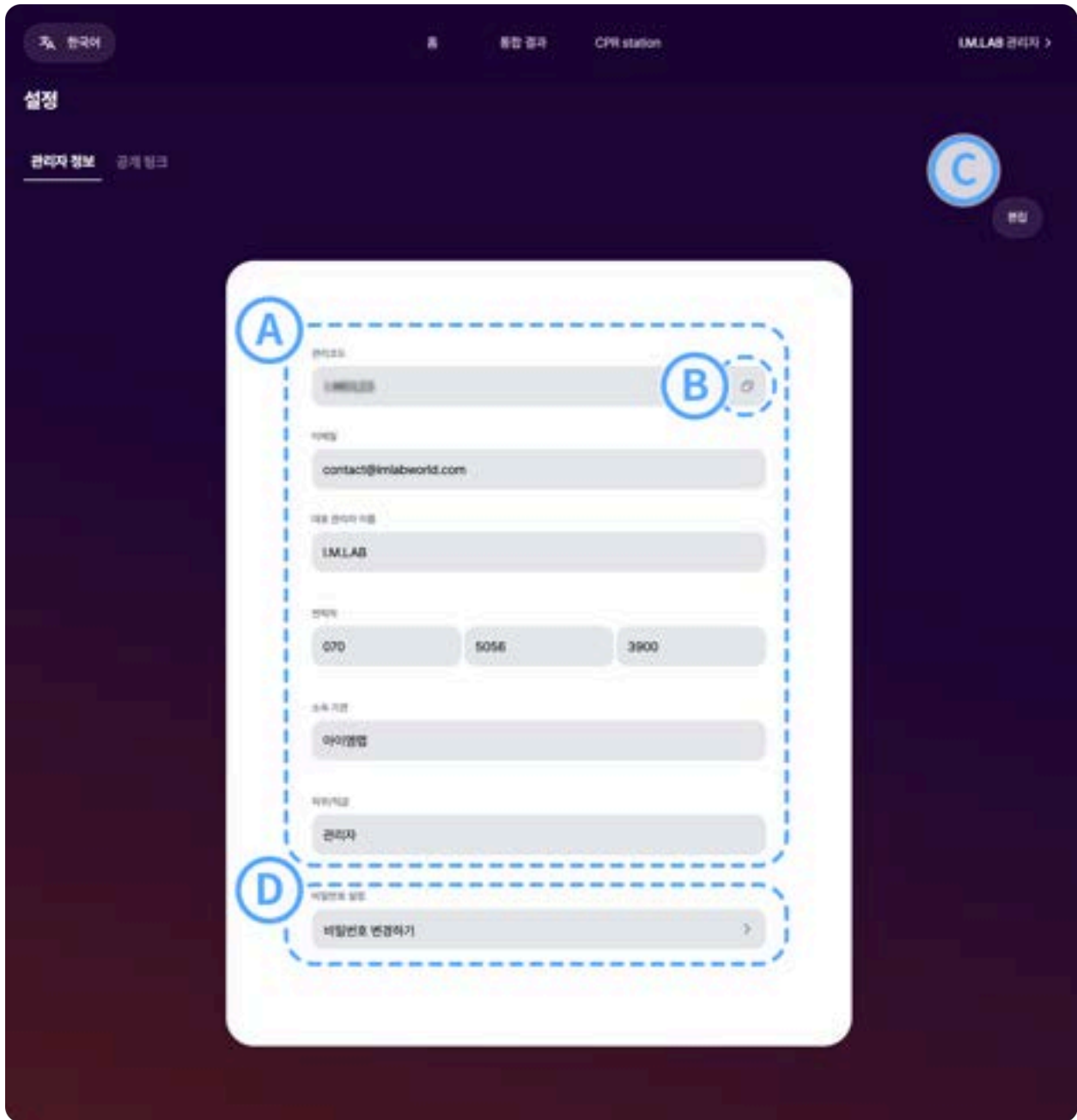

Ⓐ 관리자 계정 정보

- 내가 로그인 한 관리자 계정의 관리코드 / 이메일, 관리자 이름, 연락처, 소속기관, 직무/직급을 한눈에 확인이 가능합니다.

ⓑ 관리코드 복사

- 관리코드 복사를 누르면 '관리코드 복사 완료' 라는 팝업과 동시에 클립보드에 복사됩니다.


ⓒ 관리자 계정 편집

- 관리중인 키오스크의 그룹을 추가, 제거하거나, 설정된 명칭을 수정할 수 있습니다.

ⓓ 비밀번호 재 설정하기

- 비밀번호 재 설정하기를 누르면, '이메일로 비밀번호를 변경할 수 있는 링크를 전송했어요!' 팝업이 뜹니다. 메일함을 확인한 뒤, 링크를 눌러 비밀번호를 재설정 하면 됩니다.

5.5.1. 사용자 계정 변경

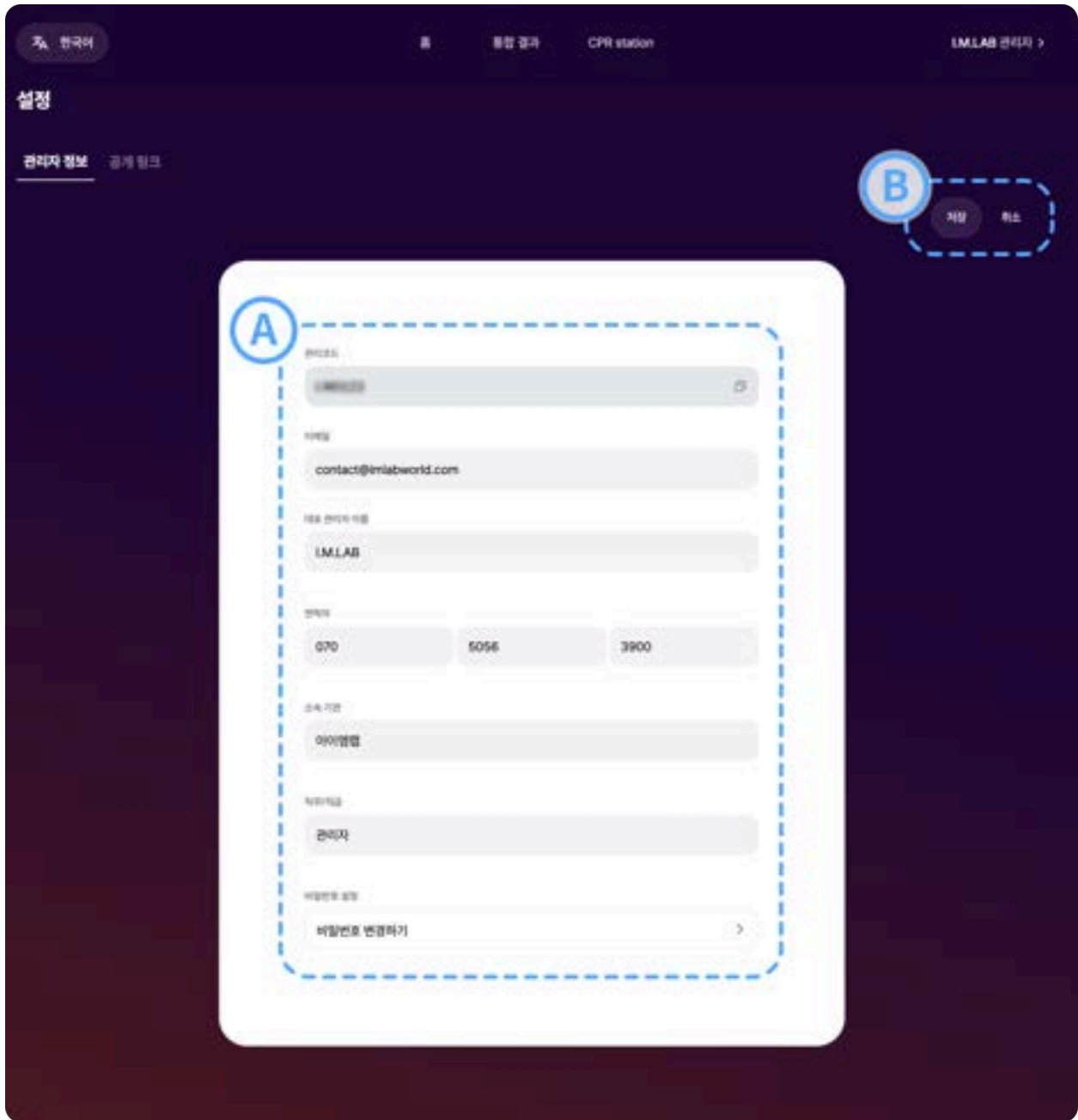

A 계정 편집 변경 후

- 내가 수정한 계정 정보가 입력되어 반영 되었는지 확인이 가능합니다.

B 결과 저장 및 취소

- 수정 했던 계정 정보를 저장하거나 취소할 수 있습니다.